

Boston
Scientific



Guida rapida

Sistema di ricarica

Vercise Gevia™

VERCISE™
Deep Brain Stimulation System

(Sistema di Stimolazione Cerebrale Profonda)



Ricaricare il sistema Vercise Gevia™ è un gioco da ragazzi

*Il sistema di
Stimolazione
Cerebrale Profonda
Vercise Gevia™
è dotato di una
batteria della durata
di 25 anni.*

In breve

Caricatore

Indicatore

*Alimentazione
pulsante
d'accensione*



+



Caricare il dispositivo è facile come contare fino a 3!

- Il sistema di ricarica è **semplice e facile da usare**.
- Il collare di ricarica è **completamente senza fili**, per garantire la **massima mobilità** durante la ricarica del dispositivo.
- **Si può decidere** quando e dove ricaricare il dispositivo.



Tutto ciò che serve per caricare lo stimolatore Vercise Gevia™:



Una **presa di corrente**



La **base**



Il **caricatore**



Il **collare per la ricarica con relativo contrappeso**

Caricare lo stimolatore con 3 semplici mosse

1. Caricare il caricatore

- Inserire la base in una presa di corrente e inserire il caricatore nella base. Sul caricatore apparirà una **spia gialla** a indicare che il **caricamento è in corso**.



- Si noti che finché la **spia gialla** rimane accesa, il caricatore è solo **parzialmente carico**. Ciò significa che può ancora essere utilizzato per ricaricare lo stimolatore DBS, ma che lo stimolatore non può essere caricato completamente.



- Quando compare la **spia verde**, il caricatore è **completamente carico**. Ciò significa che è pronto per caricare lo stimolatore DBS.




- Se la spia luminosa **non si accende** mentre il caricatore è posizionato sulla base, la **connessione potrebbe non essere stata effettuata correttamente**. Controllare che il caricatore sia posizionato correttamente sulla base.



2. Collocare il caricatore nel collare di ricarica

- Una volta sufficientemente carico, rimuovere il caricatore dalla base. Prima di collocare il caricatore nel collare di ricarica, assicurarsi che il **caricatore sia acceso**, utilizzando il **pulsante di accensione** rotondo al centro del caricatore.
- La **spia verde** si accende e il caricatore emette un **segnale acustico costante continuo**. Una volta che il caricatore è allineato correttamente con lo stimolatore, il **segnale acustico si interrompe**.

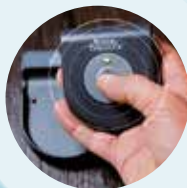


- Posizionare il **caricatore** nella tasca del collare di ricarica e posizionare il **contrappeso** nella tasca opposta.
- Posizionare il collare di ricarica intorno al collo. Assicurarsi che le **tasche di rete del collare** siano rivolte verso l'esterno.



3. Posizionare il collare per allineare il caricatore con lo stimolatore

- Spostare delicatamente il collare su e giù e da un lato all'altro fino a quando non è **posizionato sopra lo stimolatore**. Se necessario, è possibile modificare la lunghezza del collare alla misura più adatta utilizzando i **regolatori in velcro**. Quando sarà posizionato correttamente, i **segnali acustici continui cessano**.
- Controllare di tanto in tanto il caricatore per assicurarsi che sia **centrato sullo stimolatore**. Se non è centrato correttamente, i tempi di ricarica possono variare.
- Lo stimolatore è completamente carico quando viene emesso un **doppio segnale acustico della durata di 60 secondi** e la **spia verde** si spegne. Anche se non è necessario caricare lo stimolatore al 100% può essere utile sapere che la batteria è completamente carica, soprattutto prima di una sessione di programmazione in ospedale.

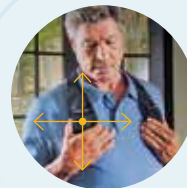

Suggerimento: Una volta che lo stimolatore è carico, rimettere il caricatore sulla base. Ciò garantisce che sarà completamente carico la prossima volta che se ne avrà bisogno. Così tutto sarà pronto!

Come rendere efficiente il processo di ricarica

Suggerimenti importanti



- **Scegliete un programma di ricarica adatto a voi:**
a seconda delle vostre preferenze, le sessioni di ricarica possono essere brevi, più frequenti o più lunghe o, ancora, meno frequenti. Scegliete una routine che meglio si adatta al vostro stile di vita quotidiano e non dimenticate che potete effettuare la ricarica mentre guardate il vostro programma televisivo preferito o mentre leggete il giornale del mattino. Una sessione di ricarica standard una volta alla settimana dura generalmente **30–60 minuti**.
- **Controllate lo stato della batteria tramite il telecomando Vercise Gevia™:** Fino a quando il caricatore non carica lo stimolatore, il telecomando Vercise Gevia™ mostra lo **stato della batteria dello stimolatore**. Se il livello è basso, lo stimolatore deve essere caricato appena possibile.
- **Mantenete la base collegata alla presa di corrente** in modo che sia **sempre pronta per ricaricare il caricatore quando necessario**.



Il presente documento non intende sostituire il Manuale del Paziente dei sistemi di Stimolazione Cerebrale Profonda Vercise™ e/o Vercise Gevia™. Il contenuto del manuale deve essere letto attentamente e compreso prima di utilizzare il Sistema di Ricarica Vercise™ Charging System. In caso di domande o se si necessita di spiegazioni su argomenti contenuti nel presente manuale, vi invitiamo a [contattare il vostro medico](#).

Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. **ATTENZIONE:** La legge limita la vendita di questi dispositivi da parte o su ordine di un medico. Indicazioni, controindicazioni, avvertenze e istruzioni per l'uso si trovano nell'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Informazioni per l'uso solo in paesi con registrazione dei prodotti presso le autorità sanitarie competenti. Materiale non destinato all'uso in Francia. Le informazioni qui contenute sono unicamente destinate alla distribuzione al di fuori degli Stati Uniti. Le illustrazioni hanno uno scopo puramente informativo - non indicative delle dimensioni effettive o dei risultati clinici.

NM-519703-AA Stampato in Germania da medicalvision.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2019 Boston Scientific Corporation
o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
DINN01311A