

Boston
Scientific




Guida rapida
Telecomando

Vercise Gevia™ | Vercise™ PC

VERCISE™
Deep Brain Stimulation System

(Sistema di Stimolazione Cerebrale Profonda)

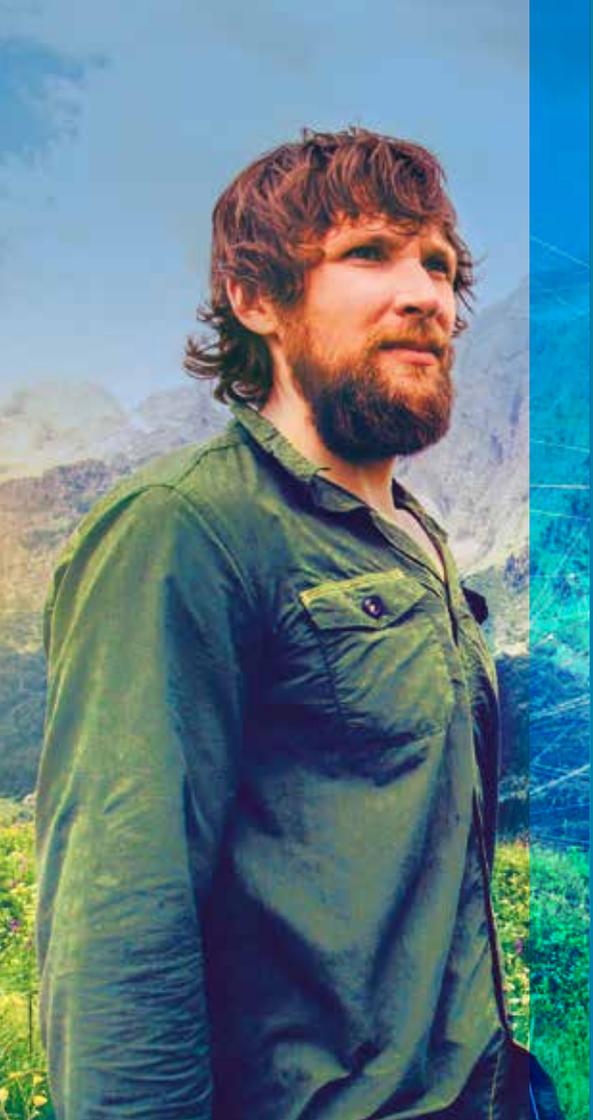

Il Telecomando dei sistemi Vercise Gevia™ e Vercise™ PC

è realizzato per controllare il livello di batteria (solo per Vercise Gevia™) del vostro stimolatore e per aiutarvi a modulare i parametri di stimolazione più adatti alle vostre esigenze.

Ed è facile da usare!

In breve


Telecomando



Come posso avviare o interrompere la stimolazione?



- Per **iniziare**, premere il tasto **“sblocca”** sul lato destro del telecomando.

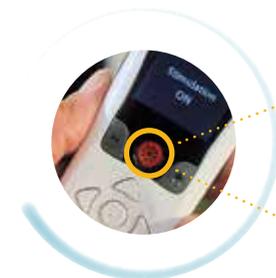

- Ora è possibile **attivare la stimolazione** premendo il **pulsante rosso** al centro del telecomando.
- Per **disattivare la stimolazione**, premere nuovamente il **pulsante rosso**.

Come posso aumentare o ridurre la stimolazione?

Se il medico vi autorizza a cambiare il livello di stimolazione, questa operazione è facilmente effettuabile sul telecomando:



- Premere la **freccia destra** per visualizzare il **menu principale**.
- Selezionare **“stimolazione”**.



- Usare i **tasti “più”** o **“meno” accanto al pulsante on/off** per **regolare la stimolazione** al livello più confortevole.

Come posso accedere o modificare i programmi di stimolazione?

Se il medico ha impostato diversi programmi di stimolazione, è possibile accedervi con poche semplici mosse:



Sia:

- premendo il **tasto "Programmi"** sul lato sinistro del telecomando.



Oppure:



- Premendo la **freccia destra** per visualizzare il **menu principale**.
- Premere la **freccia destra** una seconda volta per entrare nel **menu "Programmi"**.
- Premere la **freccia destra** una terza volta per accedere al **menu "Modifica Programma"**.



- Da qui è possibile **navigare nei diversi programmi attraverso le frecce su e giù**.
- Selezionare il **programma desiderato** premendo la **freccia destra** un'ultima volta.

Come faccio a sapere se il programma di stimolazione e l'intensità sono adatti a me?

Se il vostro telecomando presenta diversi programmi di stimolazione, è importante consultare il medico per capire quali programmi meglio si adattano ai vostri sintomi. In questo modo è possibile scegliere il programma più adatto alle proprie esigenze.

- Se il vostro medico vi autorizza a cambiare l'intensità della stimolazione, dovrete essere in grado di capire qual è il livello più adatto a voi in base al **miglioramento dei sintomi da voi riscontrato**.
- Se riscontrate degli effetti collaterali, **non aumentate l'intensità della stimolazione**.



Come si ricarica il telecomando?

- Per ricaricare il telecomando, è sufficiente collegarlo a un **cavo USB** e collegarlo a una **presa di corrente**.



- Se il **livello della batteria** del telecomando è **basso**, verrà visualizzata una **notifica di ricarica**.

Utilizzare il Telecomando Vercise Gevia™ e Vercise™ PC

Suggerimenti importanti

- **Assicuratevi che il telecomando comunichi correttamente con lo stimolatore:** se lo stimolatore non risponde al telecomando, provate ad [avvicinare il telecomando al torace](#). Ricordate anche che lo stimolatore non può comunicare con il telecomando durante la ricarica.
- **Non preoccupatevi se lo schermo del telecomando si spegne dopo circa un minuto di inattività:** il telecomando [entra in stand-by](#) per risparmiare la batteria.
- **Tenetevi aggiornati tramite la Schermata iniziale del telecomando.**



Il presente documento non intende sostituire il Manuale del Paziente dei sistemi di Stimolazione Cerebrale Profonda (DBS) Vercise™ e/o Vercise™ Gevia e/o Vercise™ PC. Il contenuto del manuale deve essere letto attentamente e compreso prima di utilizzare il telecomando Vercise™. In caso di domande o se si necessita di spiegazioni su argomenti contenuti nel presente manuale, vi invitiamo a [contattare il vostro medico](#).

Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. **ATTENZIONE:** La legge limita la vendita di questi dispositivi da parte o su ordine di un medico. Indicazioni, controindicazioni, avvertenze e istruzioni per l'uso si trovano nell'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. Informazioni per l'uso solo in paesi con registrazione dei prodotti presso le autorità sanitarie competenti. Materiale non destinato all'uso in Francia. Le informazioni qui contenute sono unicamente destinate alla distribuzione al di fuori degli Stati Uniti. Le illustrazioni hanno uno scopo puramente informativo - non indicative delle dimensioni effettive o dei risultati clinici.

NM-519702-AA Gedruckt in Deutschland von medicalvision.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2019 Boston Scientific Corporation
o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
DINNMO130IA